

wells リフトキャリア WLC-Z-200



今お使いの浴槽のままで、移乗介助の負担を軽減します。

■wells リフトキャリアの使用方法



座面の高さを調節し、車いすから移乗



洗体しやすいように体格に合わせて座面高さを調節



リフトキャリアを浴槽横に移動し、レールと連結



リフトキャリアを浴槽側へ横にスライド



昇降スイッチで座面を下降させ入槽

■wells リフトキャリアのメリット

工事なしで取り付け

その日のうちに入浴できます

座面昇降

無理な姿勢の介助を抑制

シャワーキャリアタイプ

座ったままなので安心

簡単操作

昇降ボタンと横スライドだけ

レール格納

自立入浴もリフト浴も対応


移乗介助負担軽減

- スイッチ一つで高さ調整ができるので、無理な姿勢での介助を抑制します。
- 洗髪・洗体・入槽まで乗り換える必要が無いので移乗回数を減らすことができます。



シャワーキャリータイプで安心

- 座った姿勢ですので安心して入浴を楽しんでいただけます。

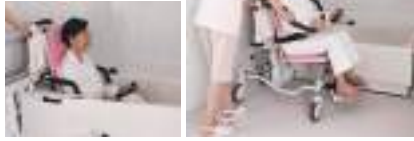

簡単操作

- 昇降スイッチと横スライドだけで簡単に操作できます。



レール格納

- 専用移乗台にレールを収納し、移乗台としてお使いいただけます。

自立入浴



専用移乗台(レール収納時)

介助入浴




レールを取り出す

工事不要


●設置必要寸法

今お使いの浴槽に工事無しで設置できます。詳細は営業所にお問い合わせください。

※設置上の注意:
浴槽周囲に図のスペースが必要となります。
※()はWLC-Z-200Lの場合。


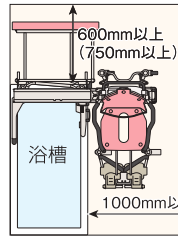


●設置対応できない浴槽(例)

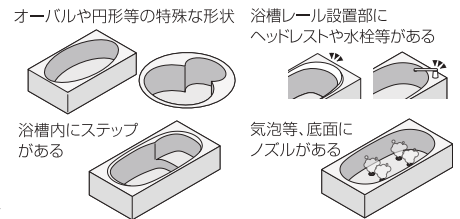

使用イメージ

- 浴槽形状により、移乗台のサイズが決まります。

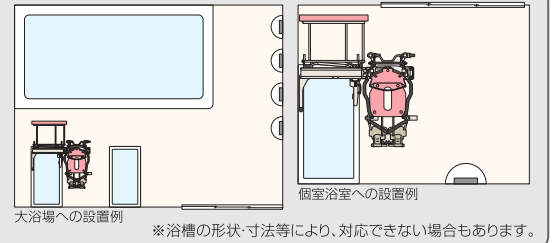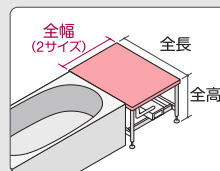

※浴槽の形状・寸法等により、対応できない場合もあります。

■メンテナンスサービスのご案内

wellsリフトキャリーを最良の状態でお使いいただくために定期点検サービスをご用意しております。

- 点検は、下記からお選びいただけます。

①1年ごとのご契約

②複数年のご契約(最長5年)

リフトキャリー本体仕様

■充電器/バッテリー1個付

品名・品番	wellsリフトキャリー WLC-Z-200
外形寸法	全高 1093~1373mm 全幅 596mm 奥行 1114mm
キャスター径	前輪 φ150mm 後輪 φ150mm
座面昇降	325~605mm
適応体重	100kg以下
機能	跳ね上げ式アームレスト 前2輪独立ロック・後2輪同時ロック ヘッドレスト一体型バックマット 移動ハンドル(高さ固定) 跨ぎサポート(オプション)
電源	鉛蓄電池DC12V-4.6Ah
モーター	DCブラシモーター
動作回数目安	フルストローク40往復(60kg負荷・満充電時) フルストローク24往復(100kg負荷・満充電時)
充電	専用充電器(電源AC100V)
充電時間	満充電約7時間
防水性	IPX4


専用移乗台仕様

■全幅は取り付ける浴槽・設置状態で決まります


外形寸法	全長 805mm 全幅(2サイズ) 613,763mm
wells リフトキャリー(WLC-Z-200S)跨ぎサポート付	TAISコード 00599-000023
希望小売価格	2,115,000円(非課税)
wells リフトキャリー(WLC-Z-200L)跨ぎサポート付	TAISコード 00599-000024
希望小売価格	2,170,000円(非課税)
wellsリフトキャリー 200 跨ぎサポート	
希望小売価格	1,350,000円(非課税*1)

*1:本体とセット購入の場合、非課税

●リフトキャリー本体(跨ぎサポートあり)

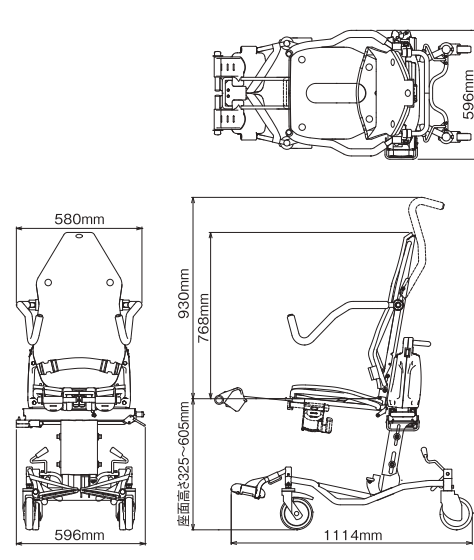

●専用移乗台(レール内蔵)

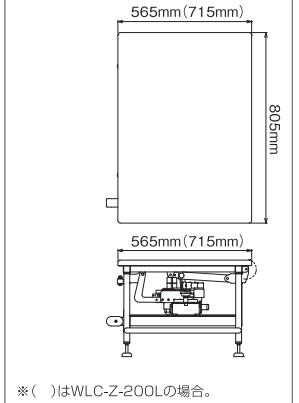

※()はWLC-Z-200Lの場合。

※リースもご利用いただけます。
※本リーフレットは印刷物のため、実際の商品の色柄と異なる場合があります。
※商品の仕様・設備は予告なく変更する場合があります。
※最新情報は当社ホームページでご確認ください。
※無断転載を禁じます。
※掲載内容は2025年1月現在のものです。

積水ホームテクノ株式会社

本社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-4-30
(ニッセイ新大阪ビル17階)

本製品に関するお問い合わせ・ご相談は(土・日・祝日を除く)

0120-117-516

<https://wells.sekisui-hometechno.com/>

wells ホームページ



資料 No.HCK1118
F-2025.1.PDF 第8版

お問い合わせ先