

ベッドが療養者の状態と安全を見守り、看護・介護負担を軽減します。

ポイント1 ベッド内蔵のセンサーでご利用者の状態や体動、離床動作を検知し、ナースコールへ通知します。



■ 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。

1. 動き出しモード	2. 起上がりモード	3. 端座位モード	4. 離床モード
<p>利用者がベッド上で動き出した時に通知します。</p> <p>動き出しを通知!</p>	<p>利用者がベッド上で起き上がった時に通知します。</p> <p>起上りを通知!</p>	<p>利用者がベッド上で端座位になった時に通知します。</p> <p>端座位を通知!</p>	<p>利用者がベッドから離床した時に通知します。</p> <p>離床を通知!</p>

■ 離床管理モード

離床後一定時間経過してもベッド上に戻らない事をお知らせします。

戻らないことを通知!

■ 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。

1. 動き出しモード

2. 起上がりモード

3. 端座位モード

4. 離床モード

5. 離床管理モード

■ 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。


1. 動き出しモード

2. 起上がりモード

3. 端座位モード

4. 離床モード

5. 離床管理モード

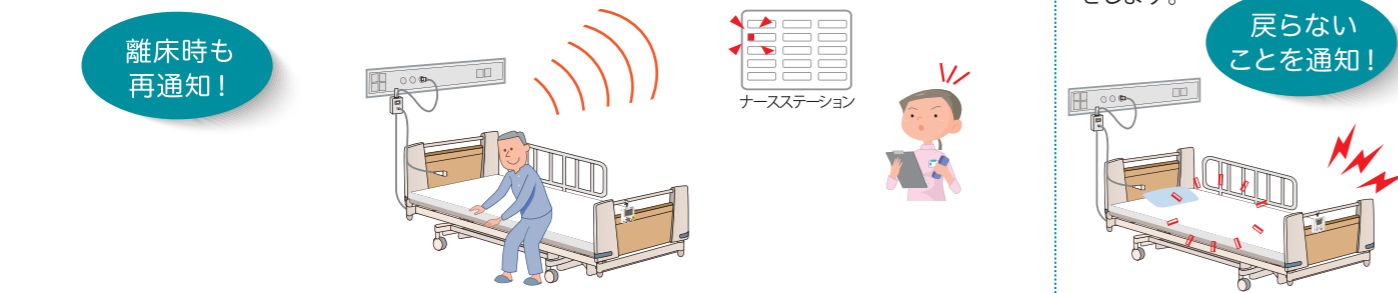

■ ナースコール設備をつなぐ分配器が必要です。(別売)


ポイント2 らくらく簡単設定 液晶手元コントローラ

操作方法が表示されるので、取扱説明書不要で、どなたでも簡単に設定・操作ができます。誤操作を防ぐキーロック機能付きです。



ポイント3 アラーム履歴表示

直近50件までのアラーム日時と内容を表示します。

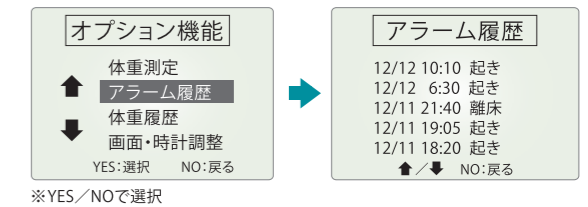


ポイント4 自動見守り再開機能

看護・介護時や食事の際に一時停止をしても、ベッド上に戻れば再設定することなく、自動で再開します。

ポイント5 体重測定機能

利用者様のおおよその体重を測定できます。体重の履歴表示が可能です。

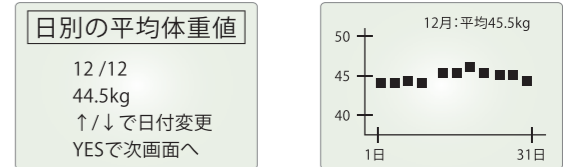

■ 行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示などさらに詳しい情報を取得できます。

※オプション1.2機能は併用が出来ません、いずれかの機能をお選びください。

オプション1 SDカードに記録された行動履歴を確認。

検知データを記録 → データ移動 → ログ解析ソフトで読み込み

■ 離床における行動特性データを活用

リスク予測管理 ケアの質の向上

看護・介護負担の軽減

ログ全体画面

- ベッド上での睡眠(体動履歴の確認)
- ナースコールアラートの時刻、回数等
- ベッド上の位置、状態確認


週別解析画面

1週間の利用者の状態をまとめて表示して解析できます。

- 1週間の利用者様の行動記録の確認・分析

オプション2 ナースコール+Wi-Fiでのリアルタイムの状態表示可能。

※Wi-Fi 対応仕様の場合、SDカードは使用できません。

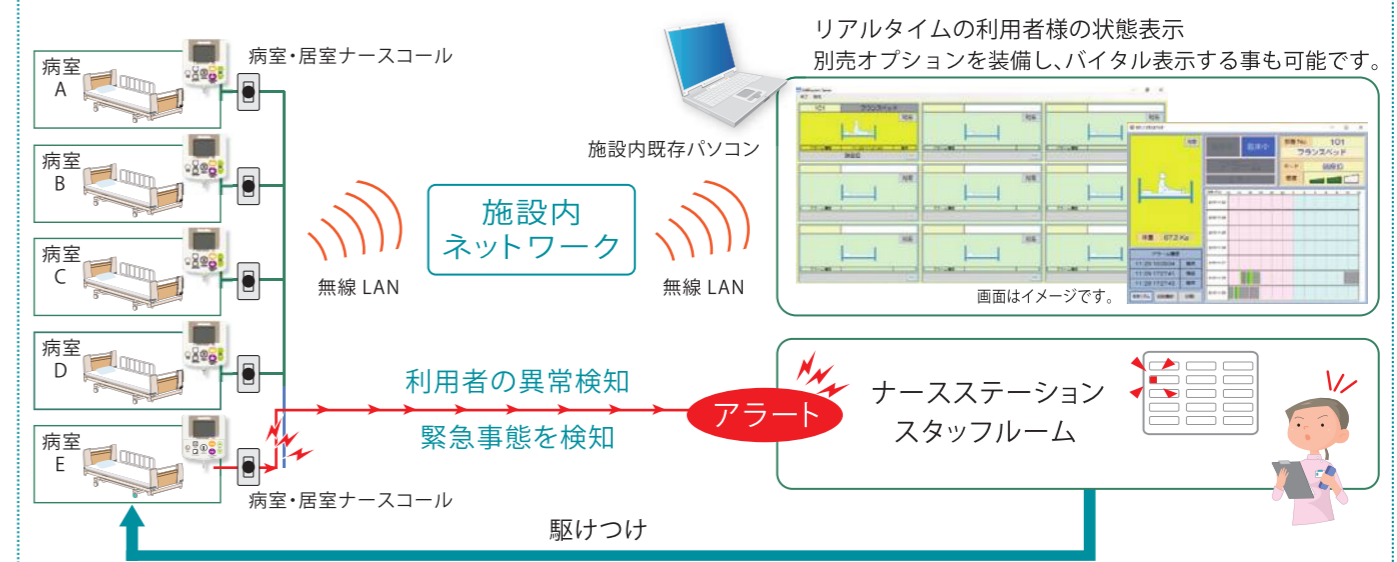

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。